

stay•safe® balance
stay•safe® bicaVera®
Träning steg för steg

Peritonealdialys

stay•safe® balance
stay•safe® bicaVera®
 Träning steg för steg

1. Förberedelser

2. Öppna yttre förpackningen

3. Tvätta händerna

4a. Öppna den mitterre avlopfogen

4b. Öppna den nedre avlopfogen

5. Kontrollera lösningen

6. Placera flödesvägaren i ballonen

7. Sätt i desinfektionslinan

8. Sätt i kasserförledningen

9. Desinficera händerna

10. Ta bort slöshölytan från flödesvägaren

11. Koppla till den nya sprutan

12. Öppna klämman - Lufslösa

13. Spolning

14. Införda

15. Använd och säker förslutning med PIN

16. Stäng klämman

17. Ta bort slöshölytan

18. Koppla ifrån

19. Sätt in den kasserförledningen på den nya desinfektionslinan

20. Färdigt flödesvägare

21. Kontrollera den utsläppta vätskan

22. Förbered en ny plats

FRESENIUS MEDICAL CARE

© 2014 Fresenius Medical Care AB. All rights reserved.

Produktnamn	stay•safe® balance, stay•safe® bicaVera® Träning steg för steg
Beställningsnummer	F00004872