

Riskhantering av potentiellt kontaminerade produkter

I enlighet med företaget Fresenius Medical Cares riktlinjer gällande hantering och transport av potentiellt kontaminerade engångsprodukter, måste vi tillsammans säkerställa att de produkter som varit i kontakt med blod och/eller annan kroppsvätska, hanteras och transporteras på ett säkert sätt. Syftet är att öka säkerheten för alla anställda inom företaget, alla kunder och alla de som på annat sätt kan komma i kontakt med nämnda produkter.

För detta ändamål har en speciell transportförpackning tagit fram:

Complaint Set

Setet kan beställas hos kundservice, tfn 08-594 776 10 eller genom e-post kundservice@fmc-ag.com.

Här beställer ni också hämtning av paketet som sker via transportföretaget TNT.

Vad är potentiellt kontaminerade produkter?

Engångsprodukter som är fyllda eller har kommit i kontakt med blod, blodprodukter, andra kroppsvätskor eller dialysat.

Innehållet i Complaint Set

- 1 par handskar
- 2 vätsketäta plastpåsar
- 1 (TNT) transportdokument. Kastas då vi i Sverige använder annat dokument.
- 1 reklambationsblankett. Kastas då vi i Sverige dokumenterar elektroniskt.
- 1 etikett UN 3373. Kan kastas då kartongen/kartongerna redan är märkta med sådan.

Handhavande vid paketering av kontaminerad produkt

- Ta på handskarna
- Vira in produkten i papper
- Lägg ner produkten i en av de vätsketäta plastpåsar. Lägg påsen i den andra påsen.
- Lägg påsen i kartongen.
- Kontakta vår kundservice 08-594 776 10 eller mejla kundservice@fmc-ag.com som därefter skickar ifylld adresslapp via mejl samt även bokar hämtning av paketet.
- Fäst adresslappen direkt på Complaint Set.
- Lämna paketet på överenskommen plats.
- Lämna transportdokumentet till personen som kommer och hämtar paketet.

Viktigt!

Vid oklarhet – kontakta berörd reklambationsansvarig innan transport sker.